



## Vacuümtherapie bij Erectiele Dysfunctie (ED)

**ACTIVE** *Erection System*<sup>NT</sup>®



**Memidis  
Pharma**  
*Men's Health*



**ACTIVE** *Erection System*<sup>NT</sup>®

Plaats de pompkop op de cilinder.



**Memidis  
Pharma**  
*Men's Health*



**ACTIVE** *Erection System*<sup>NT</sup>®

Bevestig de geleidering.



**Memidis  
Pharma**  
*Men's Health*



**ACTIVE** *Erection System*<sup>NT</sup>®

Plaats de tweede geleidering en de conus.



**Memidis  
Pharma**  
*Men's Health*



**ACTIVE** *Erection System*<sup>NT</sup>

Breng wat glijmiddel aan. Schuif de drukring tot aan de geleidering over de conus. Verwijder deze vervolgens.



**Memidis  
Pharma**  
*Men's Health*

# Gebruik van het elektrisch bedienbare systeem in de praktijk.

ACTIVE *Erection System*<sup>NT</sup>®



**Memidis  
Pharma**  
*Men's Health*



**ACTIVE** *Erection System*<sup>NT</sup>®

Breng glijmiddel aan op de geleidering.



**Memidis  
Pharma**  
*Men's Health*



**ACTIVE** *Erection System*<sup>NT</sup>®

Plaats de penis in de cilinder.



**Memidis  
Pharma**  
*Men's Health*



**ACTIVE** *Erection System*<sup>NT</sup>®

Plaats de cilinder tegen het lichaam.



**Memidis  
Pharma**  
*Men's Health*



**ACTIVE** *Erection System*<sup>NT</sup>®

Druk de cilinder stevig tegen het lichaam en zet het systeem aan.



**Memidis  
Pharma**  
*Men's Health*



**ACTIVE** *Erection System*<sup>NT</sup>®

Een vacuüm wordt gecreëerd (dit is niet pijnlijk).



**Memidis  
Pharma**  
*Men's Health*



**ACTIVE** *Erection System*<sup>NT</sup>®

De erectie wordt langzaam tot stand gebracht.



**Memidis  
Pharma**  
*Men's Health*



**ACTIVE** *Erection System*<sup>NT</sup>®

Als de erectie voldoende is schuif dan de drukring om de penis.



**Memidis  
Pharma**  
*Men's Health*



**ACTIVE** *Erection System*<sup>NT</sup>®

De erectie wordt in stand gehouden door de drukring  
(maximaal 30 minuten).



**Memidis  
Pharma**  
*Men's Health*



**ACTIVE** *Erection System*<sup>NT</sup>®

Nadien trekt u de drukring uit elkaar  
zodat er ruimte ontstaat.



**Memidis  
Pharma**  
*Men's Health*



**ACTIVE** *Erektion System*<sup>NT</sup>

De erectie neemt af. Verwijder nu de drukring.



**Memidis  
Pharma**  
*Men's Health*



**ACTIVE** *Erection System*<sup>NT</sup>®

De conditie na gebruik.



**Memidis  
Pharma**  
*Men's Health*



Memidis Pharma b.v.  
Postbus 211 6600 AE WIJCHEN

Tel 024 645 54 11  
[www.memidis.nl](http://www.memidis.nl)  
[info@erectiepomp.nl](mailto:info@erectiepomp.nl)



CE 483 Medisch hulpmiddel

**ACTIVE** *Erection System*<sup>NT</sup>®



**Memidis  
Pharma**  
*Men's Health*